

「微量金属分析検査(5項目)」 専用採血管での採血検査のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、下記の微量金属分析検査につきましては、コンタミネーションを避けるため採血管を専用容器として「金属分析用容器(血清):64番」を用いて採血いただくよう『総合検査のご案内』でご案内しておりますが、当該検査項目の依頼に際して「汎用容器:01番」で採血した容器にてご依頼されるケースが確認されていることから、正しい採血管にてご依頼いただくようご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

謹白

記

対象項目

項目コード	検査項目名	案内書掲載頁
676	亜鉛(Zn)	P.20
681	アルミニウム(Al)	
2916	セレン(Se)	
797	マンガン(Mn)	
1476	クロム(Cr)	P.21


変更期日

- 令和4年5月31日(火)以降のご依頼に際しましては、汎用容器(01番)での受付を不可といたします。

金属分析用容器(血清):64番

微量金属分析項目の採血に際しましてはコンタミネーションを避けるため、専用採血管「金属分析用容器(血清):64番」を用いて採血してご提出ください。

なお、微量金属項目以外の汎用項目のご依頼を併せて行う際は、微量金属分析項目用として専用容器(64番)及び汎用項目用として汎用容器(01番)で採血いただいた後、2本の採血管にてご依頼いただきますようお願いいたします。

採取容器(専用容器)	
金属分析用容器(血清)	
	
保管方法	常温
有効期間	容器表示