

検査容器変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、血中アンモニア (NH₃) の検体採取容器 (容器番号: 05) を変更させていただくことと致します。従来容器に比べ品質が向上しております。
何卒ご了承の程、お願い申し上げます。

謹白

記

対象容器

● 容器番号 : 05 アンモニア用容器

項目コード	検査項目	変更内容	新	旧	案内掲載頁
309	血中アンモニア (NH ₃)	容器			P.13 P.116

【採取方法】 **真空採血禁止**: 真空採血による除蛋白液の逆流を防止するため

- ① シリンジで採血を行う。
 - ② 容器の蓋を開け、注射針を外して血液を 1.0mL 正確に入れ (添加ラインまで)、蓋をしっかりと閉める。
 - ③ 十分転倒混和後、遠心分離する。
 - ④ 上清 2.0mL 以上を汎用容器 (容器番号: 02) に移し凍結してご提出下さい。
- ※ 遠心分離できない場合は血液を 1mL 正確に注入し、よく転倒混和した後に冷蔵または氷冷で保管する。
この場合は、速やかにご提出ください。

変更期日

● 令和8年4月より在庫終了次第、順次変更